



CRYOSPRAY

WARZEN- ENTFERNER VEREISUNGSSPRAY

Packungsinhalt: 50 ml Aerosol-Dose:
enthält Dimethyläther, Butan, Isobutan
und Propan. 12 Einweg-Applikatoren.
1 Gebrauchsinformation.

Cryospray Warzenentferner ist Teil
des Carnation Fußpflegesortiments,
professionell erforscht und
entwickelt für die Fußpflege.
Carnation ist ein eingetragenes
Warenzeichen.



0120

50ml e

LÖSUNGSMITTEL:
MISSBRAUCH
KANN SOFORT
TÖDLICH SEIN



HOCH-
ENTZÜNDLICH



Carnation Warzenentferner ist eine schnelle, wirksame und einfache
Anwendung zur Entfernung von Warzen.

Es wirkt durch schnelle Vereisung der Warze ohne Verwendung von Gels,
Cremes oder Pflaster.

*Eine Anwendung reicht normalerweise aus, damit sich die Warze innerhalb
von 10-14 Tagen auflöst oder abfällt. Hartnäckige Warzen können 2-3
Anwendungen notwendig machen.

GEBRAUCHSINFORMATION VOR DER ANWENDUNG SORGFÄLTIG LESEN.

VORSICHT: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht schützen und keinen
Temperaturen über 50°C aussetzen. Behälter auch nach Entleerung nicht
beschädigen oder verbrennen. Nicht vor offener Flamme oder entflammbarem
Material sprühen. Von Feuerquellen fernhalten – während der Anwendung nicht
rauchen. Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren.
Nur gemäß Gebrauchsinformation anwenden. Missbrauch durch Konzentrierung
und Inhalieren des Inhalts kann gefährlich oder tödlich sein. Kontakt mit den
Augen vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Nicht anwenden bei Diabetes oder während der Schwangerschaft. Nur zur
äußeren Anwendung. Immer einen Applikator bei der Anwendung verwenden –
niemals direkt auf die Haut sprühen. Falsche Anwendung kann zu
Vernarbungen, Verbrennungen von gesundem Gewebe oder Blindheit führen.
Dieses Produkt niemals öfter als 3 mal für die gleiche Warze anwenden.
Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren.

**Nie direkt auf die Haut sprühen. Nie sprühen, wenn der Applikator mit
der Haut in Kontakt ist.**



Hersteller: Cuxson Gerrard & Co. Ltd., 125 Broadwell Road,
Oldbury, West Midlands B69 4BF, England.



CRYOSPRAY

WARZEN- ENTFERNER VEREISUNGSSPRAY

Einfache Anwendung

1. Applikator fest an die Sprühdüse
der Dose anbringen.
2. Schutzkappe entfernen und den
Sprühknopf 3 Sekunden drücken.
3. Schutzkappe ersetzen und die
Spitze des Applikators maximal
30 Sekunden auf die Warze
drücken.

Innerhalb von 10-14 Tagen löst sich
die Warze auf, oder fällt ab.

GEBRAUCHSINFORMATION VOR DER ANWENDUNG SORGFÄLTIG LESEN.

**Nie direkt auf die Haut sprühen.
Nie sprühen, wenn der Applikator
mit der Haut in Kontakt ist.**

ENTFERNT MIT EINER ANWENDUNG*